



Vielen Dank für den Kauf der **Birth Alarm Premium Plus App mit App-Unterstützung**. Dies ist ein äußerst zuverlässiges Meldesystem zur Überwachung von Fohlengeburten. Wir empfehlen Ihnen, diese Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen, da eine korrekte Montage und Bedienung für die einwandfreie Funktion unerlässlich sind.

Inhalt

1. Einleitung	3
2. Inhalt van de verpakking	4
3. Vorbereitung zur Nutzung	5
3.1 Erstmalige Nutzung.....	5
3.2 Ein-/Ausschalten.....	6
4 Das Innere der Birth Alarm Premium Plus App	7
4.1 Batterien einlegen/wechseln.....	7
4.2 Gehäuse der Birth Alarm Premium Plus App.....	8
4.3 SIM-Karte einlegen.....	9
5 Die Kontrollleuchten (LEDs) der Birth Alarm Premium Plus App	10
5.1 Die Statusleuchten.....	10
5.2 Die LTE-Leuchten.....	11
6 Die Birth Alarm App	12
6.1 Birth Alarm herunterladen.....	12
6.2 Konto registrieren.....	13
6.3 Birth Alarm registrieren.....	14
6.4 Birth Alarm teilen.....	15
6.5 An einer Birth Alarm teilnehmen.....	16
6.6 Protokoll anzeigen.....	17
6.7 Sprache einstellen.....	18
6.8 Einstellungen ändern.....	19
6.9 Passwort zurücksetzen.....	20
7. Testen	21
8 Montage an der Stute	22
8.1 Montage unter dem Halfter.....	23
8.2 Montage im Überrollbügel.....	23
9 Zusammenfassung und Verwendungsweise	24
10 Technische Daten	25

1. Einleitung

Wenn Ihre Stute kurz vor der Fohlengeburt steht, möchten Sie dabei sein, um bei eventuellen Komplikationen eingreifen oder einen Tierarzt rufen zu können.

Pferde und Ponys haben die Eigenschaft, während der Geburt ausgestreckt auf ihrer linken oder rechten Seite zu liegen. So haben sie mehr Platz während der Wehenphase. Die Birth Alarm Premium Plus App reagiert darauf.

Wenn Sie die Birth Alarm Premium Plus App einfach in einem Überrollbügel (oder unter dem **Halfter** Ihrer Stute) befestigen, warnt Sie das Gerät, sobald die Geburt beginnt.

2. Inhalt der Verpackung

1. **Der Birth Alarm Premium Plus App Geburtsmelder.**
2. **Die spezielle Halterung** (Die Birth Alarm Premium Plus App wird hier eingeschoben.) Diese Halterung kann sowohl unter dem Halfter Ihrer Stute als auch im Ring des Überrollbügels befestigt werden.
3. **Der spezielle Schraubenzieher.** Einerseits können Sie damit Ihre Birth Alarm Premium Plus App öffnen (z. B. wenn die Batterien gewechselt werden müssen oder wenn Sie die SIM-Karte ein-/aussetzen müssen). Auf der Rückseite dieses Schraubenziehers befindet sich außerdem ein starker Magnet. Damit können Sie die Birth Alarm Premium Plus App bedienen.
4. **Kabelbinder.** Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, haben wir bereits einige Kabelbinder (auch "Tie-Wraps" genannt) beigelegt. Diese Kabelbinder sind für den Einmalgebrauch bestimmt, sind aber in jedem Baumarkt erhältlich.
5. **USB-Kabel.** Dieses (oder ein ähnliches) Kabel wird benötigt, um die Software zu aktualisieren.



3. Vorbereitung zur Nutzung

3.1 Erstmalige Nutzung

Wenn Sie die Birth Alarm Premium Plus App zum ersten Mal verwenden möchten, müssen Sie diese Schritte einmalig durchführen:

- Öffnen Sie die Birth Alarm Premium Plus App und entfernen Sie das Etikett, das sich an dem Pol einer der Batterien befindet. Die Batterien haben nun Kontakt zur Birth Alarm Premium Plus App.
- Wenn Sie dies bei Ihrer Birth Alarm Premium Plus App durchgeführt haben, können Sie diese wieder zuschrauben und mit der Einrichtung fortfahren. Achten Sie beim Zuschrauben darauf, dass die Lichtleiter über den Statusleuchten positioniert werden (*siehe 4.2*)



Aufschrauben



Etikett entfernen



3.2 Ein-/Ausschalten

Sie können die Birth Alarm Premium Plus App mit der Rückseite des mitgelieferten speziellen Schraubenziehers ein-/ausschalten und bedienen. An einer der langen Seiten des Geräts finden Sie 2 Statusleuchten.

Um die Birth Alarm Premium Plus App **EINZUSCHALTEN**, gehen Sie wie folgt vor:

- Halten Sie die Rückseite des speziellen Schraubenziehers gegen eine der Statusleuchten. (es spielt keine Rolle, welche der beiden)
- Die Birth Alarm Premium Plus App schaltet sich jetzt ein. Das Einschalten erkennen Sie daran, dass beide Statusleuchten grün aufleuchten, dann einige Male blau blinken und anschließend wieder grün leuchten.
- Nach dem Aufleuchten beider Statusleuchten können Sie die Rückseite des Schraubenziehers **wieder entfernen**.
- Ihre Birth Alarm Premium Plus App ist nun eingeschaltet. Die Statusleuchten leuchten alle ~5 Sekunden kurz grün auf, um anzuzeigen, dass die Birth Alarm Premium Plus App eingeschaltet ist und alles ordnungsgemäß funktioniert.



Um die Birth Alarm Premium Plus App wieder **AUSZUSCHALTEN**, gehen Sie wie folgt vor:


- Halten Sie die Rückseite des speziellen Schraubenziehers erneut gegen eine der Statusleuchten. (es spielt keine Rolle, welche der beiden)
- Nach kurzer Zeit leuchten die Leuchten rot auf, woraufhin die Birth Alarm Premium Plus App sich selbst ausschaltet.



4 Das Innere der Birth Alarm Premium Plus App

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der Systemkomponenten, die Sie zur Bedienung und Nutzung des Systems benötigen.

1. Batterien
2. Die 2 Statusleuchten
3. SIM-Kartenhalter
4. USB-Anschluss
5. LTE-Status-LEDs
 - 5.1 "NET" – LED
 - 5.2 "RING" – LED
 - 5.3 "LTE" – LED

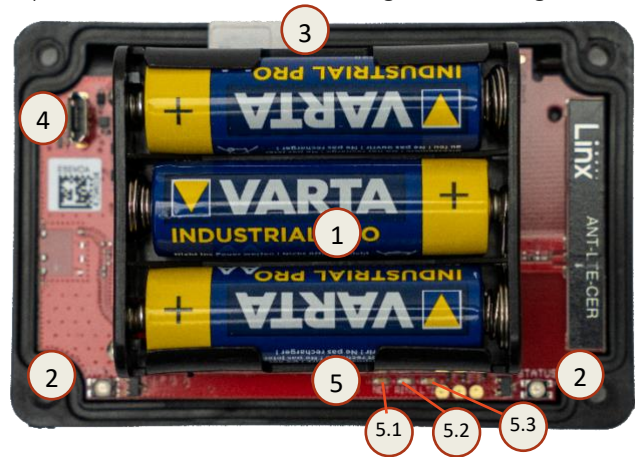

4.1 Batterien einlegen/wechseln

Beim Wechseln der Batterien Ihrer Birth Alarm Premium Plus App verwenden Sie immer Alkalibatterien (vorzugsweise "Duracell", "Panasonic" oder "Varta"). Die Verwendung von Akkus wird nicht empfohlen. Tauschen Sie die Batterien immer im 3er-Satz aus. Wenn Sie die Batterien nicht mit den Fingern herausnehmen können, können Sie vorsichtig einen kleinen Schraubenzieher verwenden. Die Batterien müssen immer mit dem Minuspol auf die Feder gelegt werden.



- *Verwenden Sie zu Beginn der Fohlensaison immer neue Batterien!*
- *Wenn Sie die Birth Alarm Premium Plus App für längere Zeit nicht mehr verwenden, z. B. nach der Fohlensaison, nehmen Sie bitte die Batterien heraus, um zu verhindern, dass diese auslaufen und Schäden an Ihrer Birth Alarm Premium Plus App verursachen.*


4.2 Gehäuse der Birth Alarm Premium Plus App

Das Gehäuse der Birth Alarm Premium Plus App kann nur auf eine Weise verschraubt werden. Die Lichtleiter auf der langen Seite des Deckels müssen beim Zuschrauben über den Statusleuchten liegen.




4.3 SIM-Karte

Ihre Birth Alarm Premium Plus App funktioniert mit einer **Nano-SIM**. Moderne SIM-Karten werden in einem Ausbrechrahmen geliefert, aus dem Sie das Nano-SIM-Format herausdrücken können. Bitte beachten Sie, dass das Nano-SIM-Format das kleinste Format ist. (12,3 x 8,8 mm).

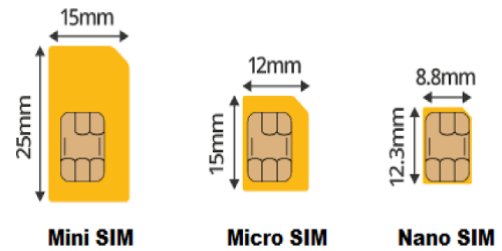

Die mitgelieferte SIM-Karte wurde bereits eingelegt und getestet. Sie müssen hier nichts weiter tun!

Sollten Sie aus irgendeinem Grund Ihre eigene SIM-Karte verwenden wollen, ist dies möglich. Ihre Birth Alarm Premium Plus App funktioniert dann als reguläre Birth Alarm Premium ohne App-Funktion. Wir empfehlen Ihnen, hierfür die Bedienungsanleitung der Birth Alarm Premium zu Rate zu ziehen.

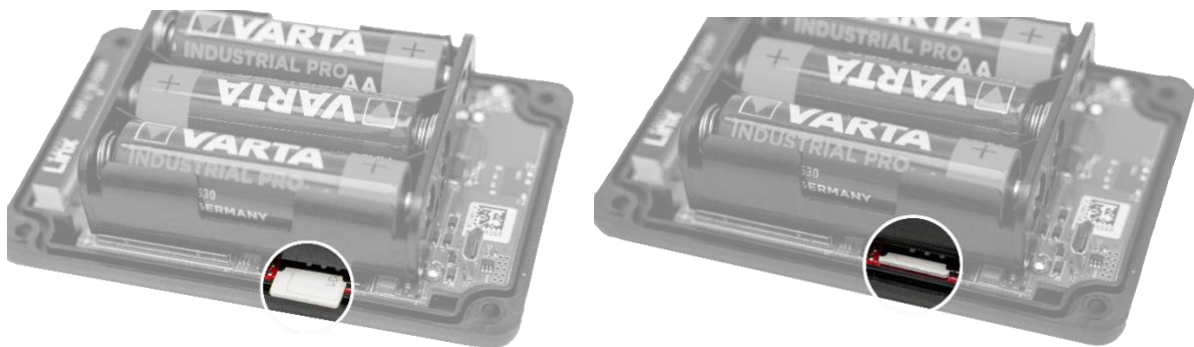

5 Die Kontrollleuchten (LEDs) der Birth Alarm Premium Plus App

Um den Status Ihrer Birth Alarm Premium Plus App ablesen zu können, befinden sich 2 Statusleuchten an der Außenseite des Geräts sowie 3 kleine Leuchten im Inneren, die ausschließlich das interne LTE-Modul betreffen.

5.1 Die Statusleuchten

Die Statusleuchten befinden sich an der langen Seite des Geräts. Beide Leuchten verhalten sich genau gleich. Die doppelte Ausführung dient ausschließlich dazu, den Status sowohl von der linken als auch von der rechten Seite Ihrer Stute jederzeit gut ablesen zu können.



In der nachstehenden Tabelle finden Sie die möglichen Farbmuster, die die Birth Alarm Premium Plus App anzeigen kann.

Farbe / Muster	Bedeutung
● ●	● Standby, Batterie OK
●● ●●	●● Standby, Batterie OK, Schlaf-Modus aktiviert
● ●	● Standby, Batterie schwach
● ●	● LTE/GSM aktiv, Verbindung wird hergestellt
●● ●●	●● LTE/GSM aktiv, Netzempfang unzureichend
●● ●●	●● LTE/GSM aktiv, Netzempfang mäßig
●● ●●	●● LTE/GSM aktiv, Netzempfang gut

5.2 Die LTE-Leuchten

Die LTE-Leuchten sind nur sichtbar, wenn Sie die Birth Alarm Premium Plus App öffnen. Normalerweise müssen Sie diese Leuchten nicht ablesen, sie können jedoch nützlich sein, wenn Sie Probleme mit der Mobilverbindung haben und den Kundendienst kontaktieren.



In der nachstehenden Tabelle finden Sie die möglichen Blinksequenzen und deren Bedeutung:

Name	Muster	Bedeutung
NET		Modul sucht Netzwerkverbindung
NET		Modul ist mit dem Netzwerk verbunden
NET		Modul stellt einen Anruf her
RING		Modul empfängt einen Anruf
LTE		Modul ist eingeschaltet

6 Die Birth Alarm App

Die Birth Alarm App unterstützt Sie während der Fohlensaison, indem sie Ihre Birth Alarm Premium Plus App Geräte kontinuierlich überwacht und Sie sofort zu Beginn der Fohleugeburt warnt.

Kurz zusammengefasst bietet die Birth Alarm App:

- Echtzeit-Einblick in den Status, die Aktivität, den Batteriestand und die Verbindung Ihrer Geräte
- Sofortige Alarmmeldungen zu Beginn der Fohleugeburt (über einen Internet-Anruf)
- Die Möglichkeit, Name, Foto und Einstellungen pro Gerät anzupassen
- Übersicht und Verwaltung mehrerer Geräte in einer App
- Einfaches Teilen des Zugriffs mit anderen Benutzern (z. B. Familie, Freunde oder Stallteam)

6.1 Birth Alarm App herunterladen

Um Benachrichtigungen von Ihrer Birth Alarm Premium Plus App mit App-Unterstützung auf Ihrem Telefon zu empfangen, müssen Sie unsere eigene App "**Birth Alarm**" verwenden.


Diese ist im **App Store** für iOS und im **Google Play Store** für Android verfügbar.

Sie können die App auch einfach herunterladen, indem Sie den untenstehenden QR-Code scannen:




6.2 Konto registrieren

1 2

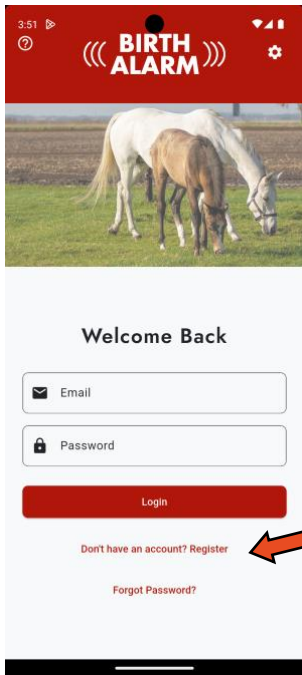


Wenn Sie die Birth Alarm App starten, sehen Sie diesen Bildschirm.

Tippen Sie auf 'Noch kein Konto? Registrieren', um ein neues Konto anzulegen.

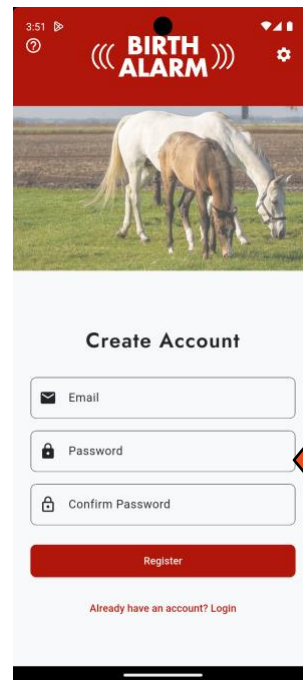

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und das gewünschte Passwort ein.

3

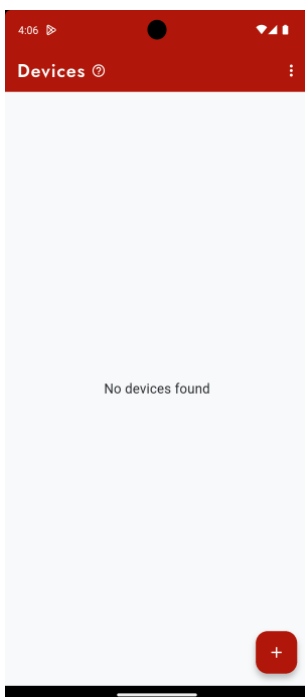


Nach der Registrierung sehen Sie eine leere Geräteliste.

Sie können jetzt ein neues Gerät hinzufügen.

6.3 Birth Alarm registrieren

1 2

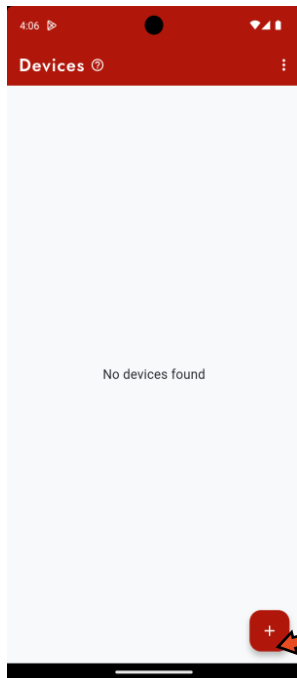


Tippen Sie auf die +-Schaltfläche, um ein neues Gerät zu registrieren.



Tippen Sie auf 'Neues Gerät registrieren'.


3 4

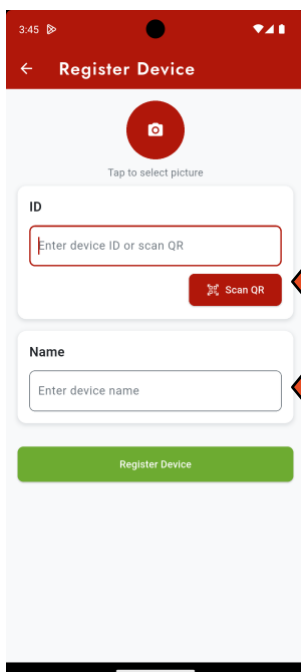

Tippen Sie auf 'QR scannen', um Ihre Kamera zu öffnen. Scannen Sie den QR-Code, der sich in der Produktverpackung befindet.

Sie können einen passenden Gerätenamen eingeben, z. B. den Namen Ihrer Stute.

Fertig? Tippen Sie dann auf 'Gerät registrieren'.

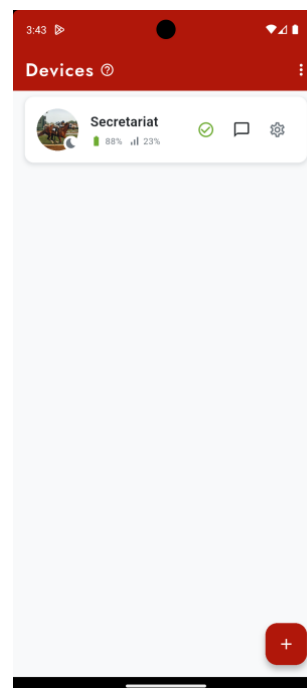


Die Birth Alarm Ihrer Stute ist jetzt mit Ihrem Konto verknüpft.

Sie können jetzt in der Geräteliste den Status, den Akkustand und das Signal einsehen.

6.4 Jemanden einladen, Ihre Birth Alarm gemeinsam zu nutzen


Geben Sie einem anderen Benutzer Zugriff auf die Benachrichtigungen Ihrer Birth Alarm, damit Sie gemeinsam Benachrichtigungen empfangen und die Geburt überwachen können.

1 2

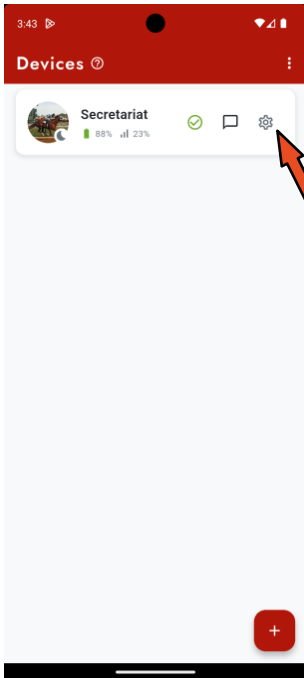


Mit der Birth Alarm App können Sie Ihre Birth Alarm mit einem anderen Benutzer teilen.

Tippen Sie zunächst auf die Einstellungsschaltfläche der Birth Alarm, die Sie teilen möchten.

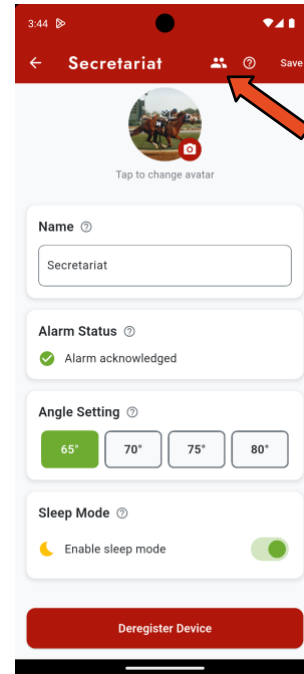

Tippen Sie auf das Symbol 'Benutzer'


3 4

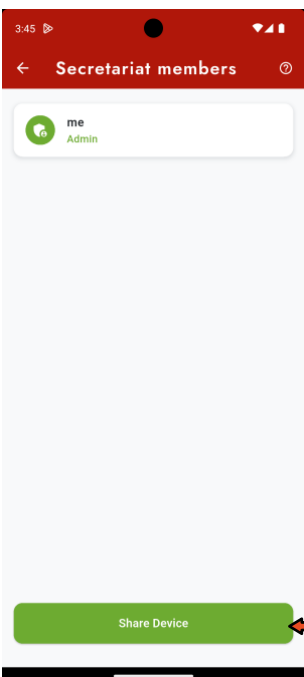

Sie sehen eine Liste mit Mitgliedern.

Tippen Sie auf 'Gerät teilen', um jemandem den QR-Code zu zeigen oder einen Link zu senden.

Dieser wird benötigt, um das Gerät hinzuzufügen.

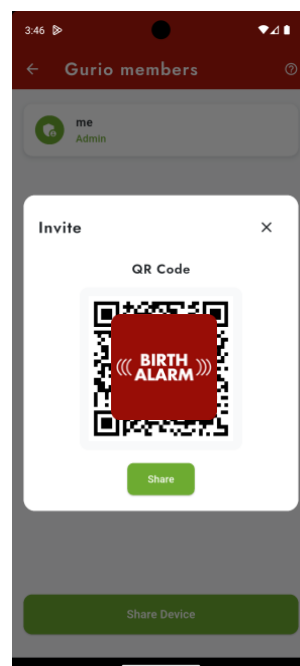


Lassen Sie die eingeladene Person den QR-Code scannen in der Birth Alarm App (siehe Schritt 6.5) oder dem geteilten Link folgen.

Das Gerät erscheint dann in deren Birth Alarm App.

6.5 Birth Alarm Einladung annehmen

Nehmen Sie die Einladung des Administrators an, um Benachrichtigungen einer Birth Alarm zu erhalten.

1 2

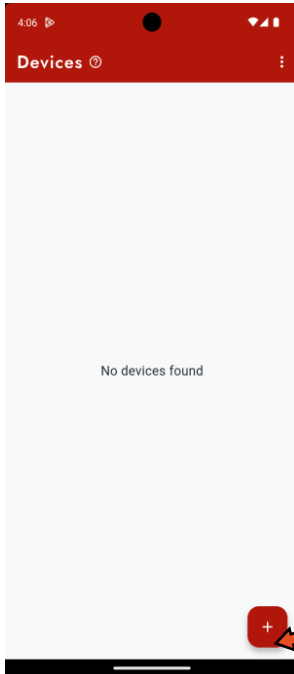


Mit der Birth Alarm App können Sie Birth Alarms anderer Benutzer hinzufügen.

Tippen Sie auf die +-Schaltfläche, um eine Birth Alarm hinzuzufügen.




Tippen Sie auf 'Bestehender Gruppe beitreten'

3 4

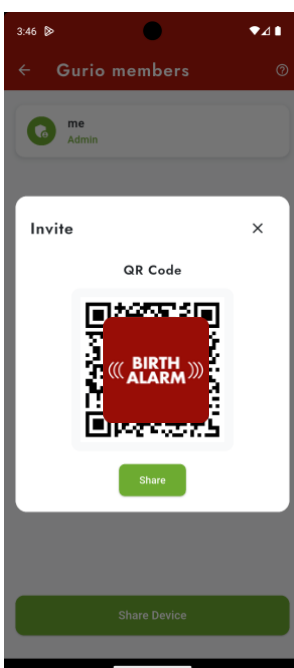

Scannen Sie den QR-Code, den Ihnen der Eigentümer der Birth Alarm gegeben hat, oder klicken Sie auf den

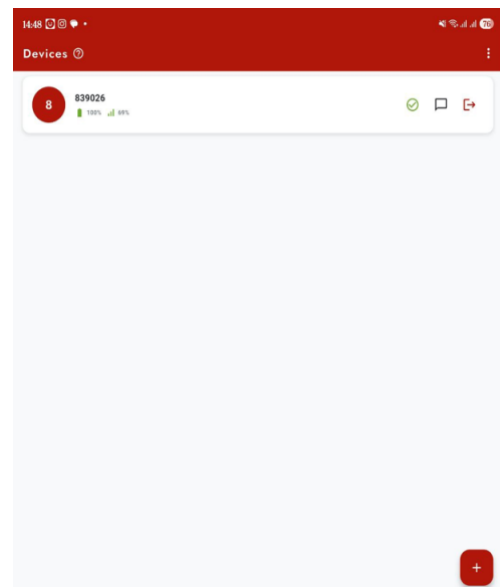

Die Birth Alarm einer anderen Person wurde nun mit Ihrem Konto geteilt.

Sie können jetzt in der Geräteliste den Status, den Akkustand und das Signal einsehen. 16

6.6 Protokoll anzeigen

1 2



Die Birth Alarm App zeigt Ihnen den Benachrichtigungsverlauf und ermöglicht es Ihnen, mit anderen Benutzern über die Stute zu kommunizieren.

Tippen Sie zunächst auf das Symbol "Nachrichten" des Birth Alarm-Geräts.



Das Protokoll enthält Ereignisse über die Stute in chronologischer Reihenfolge.

Dazu gehören beispielsweise Benachrichtigungen, Batteriewarnungen und mehr.

Sie können auch selbst den Status der Stute durch Eingabe einer Nachricht notieren.

Das Protokoll zeigt Benachrichtigungen der Stute mit den zugehörigen Messwerten. Nachfolgend erfahren Sie, was diese Werte bedeuten:

Batteriestand

Neben "Battery" sehen Sie den verbleibenden Batteriestand in Prozent. Wir empfehlen, die Batterie bei etwa 15 % zu wechseln.

Signalstärke


Die Signalstärke gibt die Empfangsstärke der Birth Alarm Premium Plus App an. Diese muss mindestens 15 % betragen. Bei einem niedrigeren Wert kann das System nicht zuverlässig funktionieren. Die Birth Alarm Premium Plus App wählt automatisch das beste verfügbare Netzwerk.

Gemessener Liegewinkel

Neben "Angle" finden Sie den gemessenen Liegewinkel in Grad. Diesen Wert können Sie verwenden, um den Erkennungswinkel bei Bedarf anzupassen.


6.7 Sprache einstellen

1 2

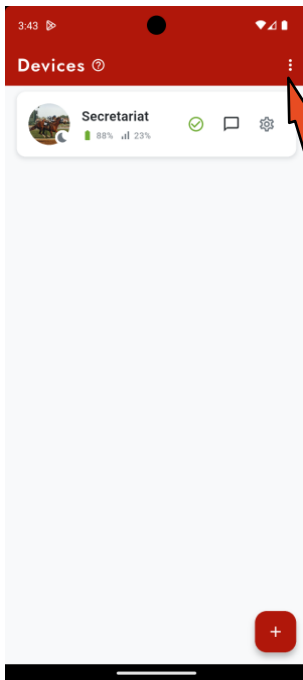


Mit der Birth Alarm App können Sie Ihre eigene Sprache einstellen.

Tippen Sie zunächst auf die drei Punkte oben rechts auf dem

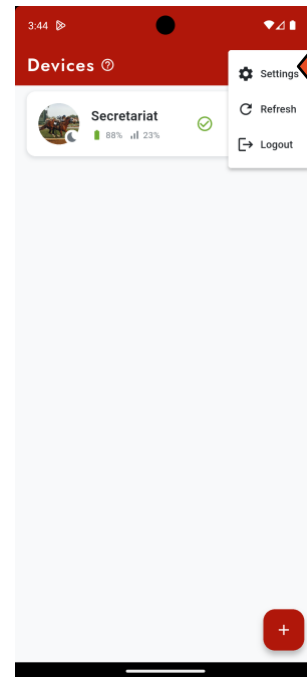

Tippen Sie auf 'Einstellungen'.

3 4

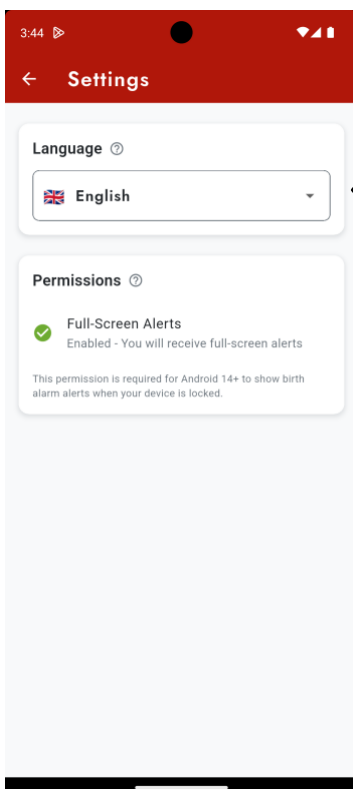

Ändern Sie die Sprache auf die gewünschte


6.8 Birth Alarm Einstellungen anpassen

1 2



Mit der Birth Alarm App können Sie den Aktivierungswinkel einstellen und den Schlaf-Modus ein- oder ausschalten.

Tippen Sie zunächst auf die Einstellungsschaltfläche der Birth Alarm.

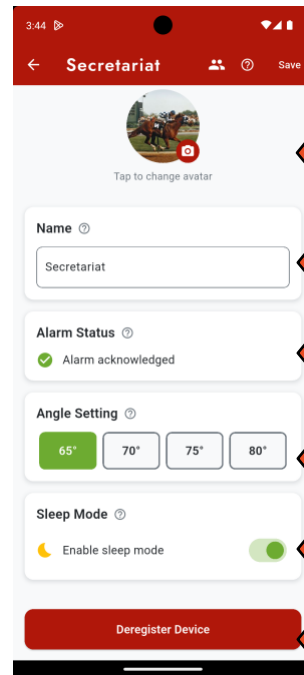

Hier können Sie:

Ein Foto festlegen

Den Namen ändern


Den Alarm bestätigen

Den Erkennungswinkel einstellen

Den Schlaf-Modus ein- oder ausschalten

Das Gerät entfernen

3

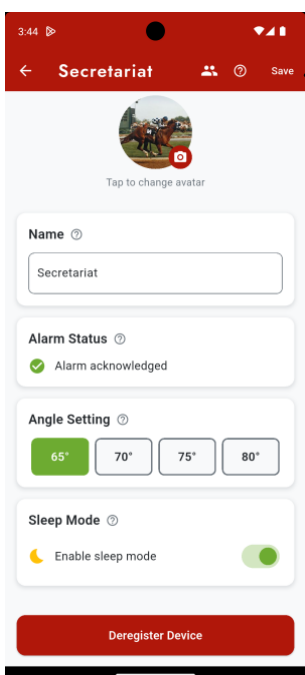

Vergessen Sie nicht, auf 'Speichern' zu tippen, nachdem Sie eine Änderung vorgenommen haben.

Schlaf-Modus

Verwenden Sie den Schlaf-Modus, wenn Ihre hochtragende Stute vollständig ausgestreckt ruht oder schläft.

In diesem Modus wird eine Benachrichtigung durch bloßes ausgestrecktes Liegen verhindert.

Der Alarm wird erst aktiviert, wenn das ausgestreckte Liegen mit Unruhe einhergeht, wie es bei Wehen der Fall ist. Der Schlaf-Modus kann einfach ein- oder ausgeschaltet werden.

Winkleinstellung

Die Birth Alarm Premium Plus App erkennt, wenn Ihre Stute ausgestreckt auf der Seite liegt. Dies geschieht auf Basis des Liegewinkels: Standardmäßig gilt ein Winkel größer als 65° als abnormal, woraufhin der Alarm aktiviert wird.


Dieser Schwellenwert ist einstellbar; ein höherer Wert macht den Alarm weniger empfindlich und lässt ihn später reagieren.

Wenn Sie wiederholt Benachrichtigungen erhalten, obwohl nichts passiert (z. B. bei einem Liegewinkel von 65°), können Sie den Erkennungswinkel für diese Stute erhöhen, z. B. auf 70°. Stellen Sie diesen vorzugsweise **nicht höher als 75° ein**.

Hinweis: Versuchen Sie immer zuerst den normalen Modus, bevor Sie den Schlaf-Modus aktivieren. Versuchen Sie zuerst den Schlaf-Modus, bevor Sie den Erkennungswinkel anpassen.


6.9 Passwort zurücksetzen

1 2

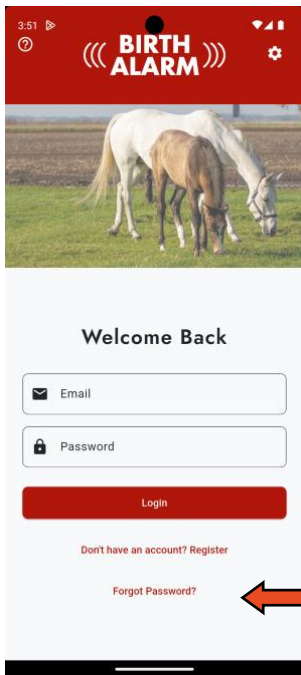

Mit der Birth Alarm App können Sie Ihr Passwort zurücksetzen, falls Sie es vergessen haben.

Tippen Sie auf **“Passwort vergessen?”**, um zu beginnen.

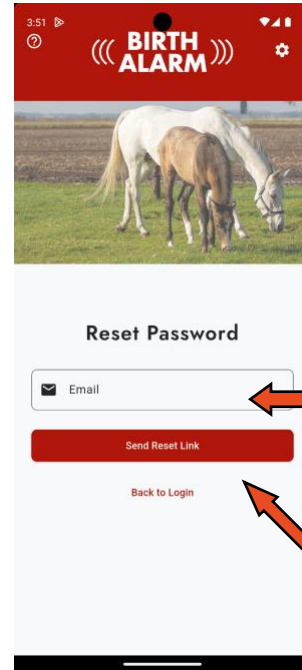


Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.

Nach dem Klicken auf **“Reset-Link senden”**


Sie erhalten einen Link in Ihrem Postfach.

3 4

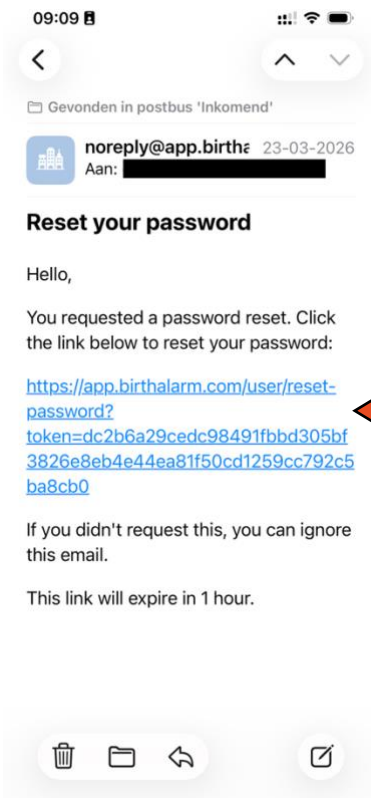

Klicken Sie auf den Link, um das Zurücksetzen zu starten.

(dies kann auch auf einem anderen Gerät als dem mit der App erfolgen)

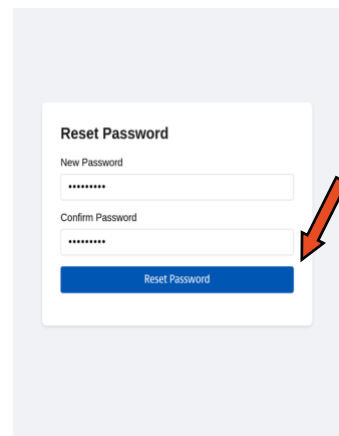

Geben Sie Ihr neues Passwort zweimal ein und klicken Sie auf **“Passwort zurücksetzen”**.

Ihr Passwort wurde jetzt aktualisiert. Sie können sich jetzt mit Ihren neuen Anmeldedaten in der Birth Alarm App anmelden.

7. Testen

Bevor Sie die Birth Alarm Premium Plus App verwenden, ist es wichtig, diese zunächst zu testen, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktioniert. Den Test können Sie einfach selbst durchführen.

- Bringen Sie die Birth Alarm Premium Plus App vorzugsweise an den Ort, an dem sich Ihre Stute befindet.
- Nehmen Sie die Birth Alarm Premium Plus App in die Hände und schalten Sie diese ein, sodass die Statusleuchte alle 4 Sekunden einmal grün aufleuchtet.
- Drehen Sie die Birth Alarm Premium Plus App jetzt um 90 Grad, sodass eine der schmalen Seiten nach oben zeigt. *(Hinweis: Wenn Sie den Schlaf-Modus verwenden, müssen Sie die Birth Alarm Premium Plus App nach 15 Sekunden, innerhalb von 3 Minuten, wieder horizontal legen)*
- Die Statusleuchte beginnt jetzt orange zu blinken.
- Nach einigen Sekunden wird die Statusleuchte blau und eine Verbindung wird aufgebaut.
- Innerhalb kurzer Zeit sendet die Birth Alarm Premium Plus App eine Benachrichtigung an Ihre Birth Alarm App.
- Öffnen Sie die Birth Alarm App und bestätigen Sie die Benachrichtigung

Wenn der Test erfolgreich verlaufen ist, können Sie die Birth Alarm Premium Plus App an Ihrer Stute im Überrollbügel oder am Halfter befestigen.

8 Montage an der Stute

Um die Birth Alarm Premium Plus App in einem Bauchgurt oder unter dem Halfter verwenden zu können, muss diese in der mitgelieferten Halterung befestigt werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- Schieben Sie die Birth Alarm Premium Plus App vorsichtig in die Halterung, wie auf dem nachstehenden Foto gezeigt.
- Achten Sie darauf, dass beide Statusleuchten sichtbar sind.
- Schließen Sie anschließend die Klappe mit dem mitgelieferten Verschlussclip.

i *Im nachstehenden Beispiel sind die Statusleuchten in Richtung des Verschlussclips ausgerichtet, Sie können das Gerät jedoch auch umgekehrt einsetzen. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion.*



8.1 Montage im Überrollbügel

Wenn Sie die Birth Alarm Premium Plus App in einem Überrollbügel verwenden, montieren Sie die Halterung mit der Birth Alarm Premium Plus App gemäß der nachstehenden Abbildung. Verwenden Sie zum Befestigen im Überrollbügel 6 Kabelbinder. Achten Sie darauf, dass der Melder in Bezug auf den Rücken der Stute gut waagrecht sitzt.



8.2 Montage unter dem Halfter

Wenn Sie die Birth Alarm Premium Plus App unter einem Halfter verwenden möchten, montieren Sie diese wie nachstehend vorgeschrieben mit 3 Kabelbindern. Achten Sie darauf, dass das Halfter etwas straff sitzt, sodass die Birth Alarm Premium Plus App direkt unter dem Kiefer der Stute hängt.



9 Zusammenfassung und Verwendungsweise

Nachfolgend wird kurz beschrieben, wie die Birth Alarm Premium Plus App funktioniert und wie diese verwendet werden muss. Wir empfehlen Ihnen, diesen Text zu lesen.

Die Birth Alarm Premium Plus App überprüft alle 4 Sekunden die Körperhaltung Ihrer Stute. In den Zwischenphasen schaltet die Birth Alarm Premium Plus App in einen energiesparenden Zustand um, damit die Batterie nicht belastet wird. Wenn Ihre Stute Wehen bekommt und sich dadurch ausgestreckt hinlegt, informiert Sie die Birth Alarm Premium Plus App. Sie erhalten nun eine Benachrichtigung von der Birth Alarm App. Öffnen Sie die App und bestätigen Sie den Alarm in der App. Die Birth Alarm Premium Plus App wird erst wieder aktiv, wenn das Pferd nach einiger Zeit erneut liegt.

Wenn Sie die Birth Alarm Premium Plus App in eine Chat-Gruppe aufgenommen haben, erhalten alle Gruppenmitglieder gleichzeitig eine Benachrichtigung der Birth Alarm Premium Plus App, wenn die Geburt stattfinden soll. Der Alarm kann von einem der Mitglieder der Gruppe gestoppt werden.

Mit einem Satz Alkalibatterien kann das System in der Regel mindestens einen Monat lang betrieben werden. Die Verwendung von Akkus oder günstigeren Zink-Kohle-Batterien wird dringend abgeraten!

10 Technische Daten

Versorgungsspannung	4,5V (3xAA Alkaline)
Stromverbrauch	200µA Durchschnitt (1,3A Spitze)
LTE-Modul	LTE FDD B1/B8/B7/B8/B20/B28 WCDMA B1/B8 GSM/EDGE B3/B8
Schlaf-Modus	Ja
Erkennungswinkel	Einstellbar 65..80°
Benachrichtigungstypen	Birth Alarm App, Anruf, SMS

Garantie: Bis zu 2 Jahre ab Kaufdatum. Gilt nicht bei Bruch, Wasserschäden und/oder sonstigen Beschädigungen.

Haftungsausschluss: Der Hersteller und der Importeur haften nicht für Schäden jeglicher Art, die aus der Verwendung der Birth Alarm Premium Plus App entstehen.

Lieferung und Leistungen erfolgen gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Dijkstra-Group B.V.